
yuwell




Guide d'installation

Série d'accessoires respiratoires

Masque nasal

YN-02

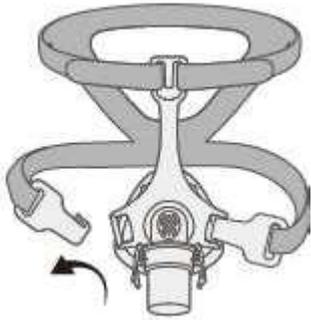

1

Détachez les attaches inférieures du harnais du cadre.




2

Tenez le masque de manière stable sur votre visage et passez le harnais sur votre tête.




3

Ramenez les sangles inférieures du harnais au-dessous de vos oreilles, attachez le harnais sur la partie inférieure du cadre.

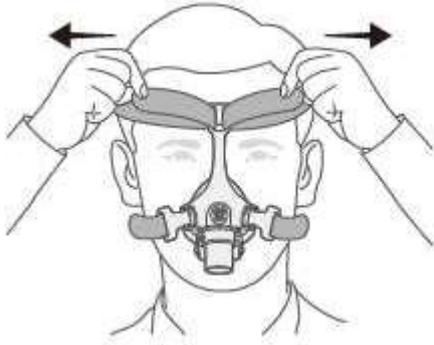


4

Défaites les languettes de fixation sur les sangles supérieures du harnais. Tirez les sangles de manière uniforme jusqu'à ce qu'elles soient installées confortablement et fermement, puis rattachez à l'aide du velcro. Assurez-vous que le masque est correctement installé.

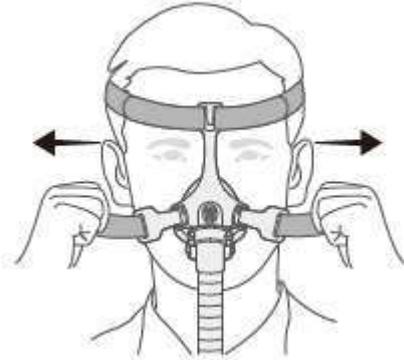

5

Défaites les languettes de fixation situées sur les sangles inférieures du harnais. Tirez les sangles de manière uniforme jusqu'à ce qu'elles soient installées confortablement et fermement. Rattachez les languettes de fixation.

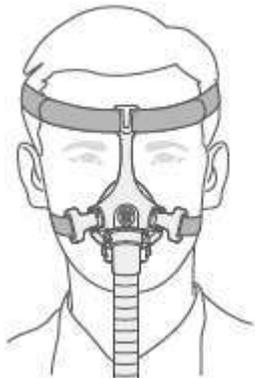

6

Votre masque et votre harnais doivent être positionnés de la manière indiquée sur l'illustration.